



HEAP CO 2.000 s.r.o.

Ke Hvězdárně 514, 267 53 Žebrák

Tel:+420 311 533 336

Fax:+420 311 533 314

e-mail: obchod@heapco.cz www.heapco.cz

Očkovací automat pro 10 ml, 30 ml, 50 ml

Návod k použití

Před uvedením do provozu se podrobně seznámte s tímto návodem. Návod pečlivě uschovejte k případnému nahlédnutí.

Výhody očkovacího automatu:


- opakovaná aplikace
- kovové tělo se skleněným válcem
- jednoduché dávkování

Určení přístroje :

Automat je robustní konstrukce a je určen pro plynulé očkování zvířat. Velmi jednoduché čištění automatu díky snadnému rozebrání. Před každým použitím dávkovače je nutné vyčistit a desinfikovat automat.

Popis přístroje :

- A) Rukojeť
- B) Kovové tělo
- C) Skleněný válec
- D) Nastavení dávkování
- E) Natahovací táhlo pístu

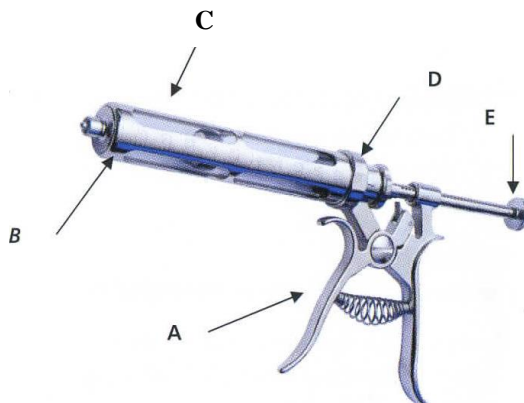

Uvedení do provozu:

1. Nasazení jehly


1.1. Uchytíte jehlu do Luer-Lock zámku a zajistíte ve směru hodinových ručiček.

1.2. Jehlu sejmete pootočením opačným směrem.


Pozor! Pro vaše bezpečí sejmete ochranný obal z jehly teprve, až bude stříkačka připravena k použití.

2. Nasátí aplikační látky

- 2.1. Přidržte natahovací táhlo pístu (E) v dolní poloze.
- 2.2. Otáčejte táhlem ve směru hodinových ručiček tak, až se těsnící guma roztáhne ve stěně válce a bude těsnit.
- 2.3. Vytažením táhla pístu nasajte očkovací látku do válce.
- 2.4. V případě potřeby přitáhněte nebo povolte těsnící gumu.
- 2.5. Nyní je stříkačka připravena k aplikaci.

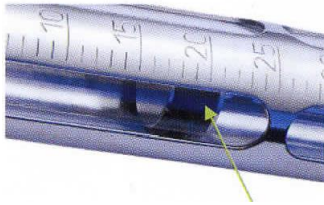

Gumový pohyblivý píst

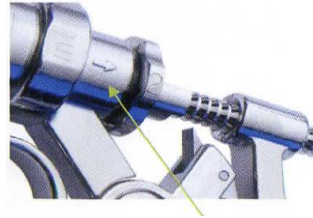

Dávkovací zařízení

3. Nastavení dávky

- 3.1. Na dávkovacím zařízení je možné nastavit toto dávkování:
Dávka 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml nebo 5 ml u modelů 30 ml a 50 ml
Dávka ¼ ml, ½ ml nebo 1 ml u modelu 10 ml

Ošetření:

Po použití automat důkladně propláchněte horkou vodou se saponátem. Poté vypláchněte čistou teplou vodou.

Desinfekce:

Výrobce doporučuje před i po každém použití desinfekci.

1. Nejprve vypláchněte automat horkou vodou.
2. Kompletně rozložený automat vložte do nádoby s vodou a vařte nejméně 20 minut.
3. Po vyvaření osušte a zkompletujte.

Promazání:

Odšroubujte uzávěr a gumový píst i skleněný válec promažte 100% čistým olejem. Nepoužívejte minerální oleje, silikon, WD-40, glycerín nebo alkohol. Produkty na ropné bázi způsobují tvrdnutí gumových dílů pístu a snižují jejich životnost.



Likvidace

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se jeho části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí.

- Kovové části se roztřídí podle druhu kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci. Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu, se roztřídí a odevzdají organizaci, zabývající se sběrem těchto materiálů.